




مدا للحلول السمعية
MADA HEARING SOLUTIONS

ReSound GN

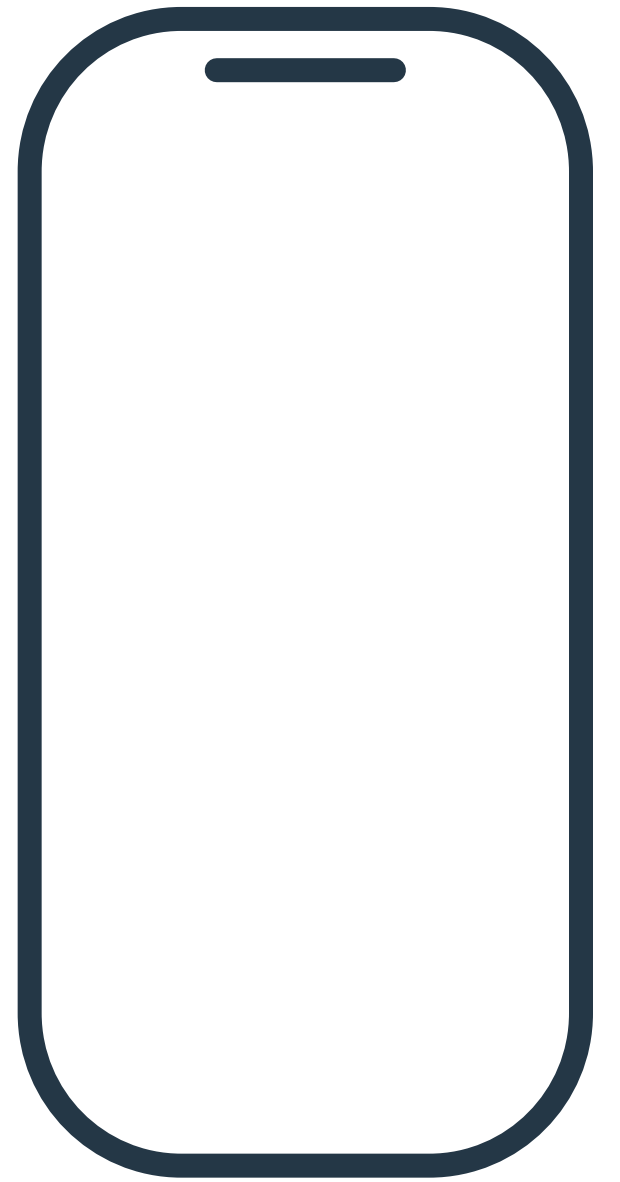

تطبيقات ReSound Smart 3D™ و ReSound Smart™

فقط RX

madahearing.com

نشرك علمه اختيار منتجاتنا

تم إنشاء هذا التطبيق لتسهيل استخدام سماعاتك الطبية والأجهزة المساعدة للتحكم بها من أجهزتك الذكية.

للحصول علمه معلومات حول الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة المتوافقة مع التطبيق،
تفضل بزيارة:

<https://www.gnhearing.com/en/products/compatibility>



قبل أن تتمكن من بدء استخدام التطبيق، يجب عليك إقران هاتفك الذكي أو جهازك المحمول بسماعاتك الطبية. يتم ذلك بسهولة – ما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه.

كيفية إقران أجهزة السمع بجهاز IOS الخاص بك:

1. أوقف تشغيل سماعاتك الطبية.
2. قم بتشغيل خاصية الـ Bluetooth® في جهازك الذكي عبر الإعدادات الرئيسية، حتى يتحول شريط التمرير إلى اللون الأخضر عند تنشيط Bluetooth.
3. ارجع إلى قائمة الإعدادات الرئيسية، ثم انقر على خيار «إمكانية الوصول».
4. مرر للأسفل وانقر على خيار «أجهزة السمع».
5. تأكد من عدم وجود أي أجهزة سمع مقترنة مسبقاً.
6. قم بإعادة تشغيل سماعاتك الطبية الآن، سيتمكن جهاز IOS الخاص بك من اكتشاف سماعاتك الطبية.
7. قم باختيار سماعاتك الطبية ومن ثم انقر فوق «اقتران».
8. انتقل إلى متجر التطبيقات، وفي حقل البحث في الأعلى، أدخل اسم التطبيق بحسب طراز سماعاتك الطبية.*
9. قم بتنزيل التطبيق وافتحه وانقر فوق «بدء الاستخدام».




كيفية إقران سماعاتك الطبية مع جهاز اندرويد:

1. انتقل إلى متجر التطبيقات في حقل البحث في الأعلى، أدخل اسم التطبيق وقم بتنزيله.
2. قم بتثبيت التطبيق بعدها اضغط قبول للسماح للتطبيق باستخدام خاصية البلوتوث.
3. افتح التطبيق وأضغط على البدء وتتبع الخطوات على الشاشة لربط سماعتك الطبية بالتطبيق بعد ذلك يمكنك البدء في استخدام التطبيق.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال.




ملاحظة: إذا كنت قد قمت بإقران أي أجهزة سمع من قبل، فيجب عليك إلغاء إقرانها في قائمة البلوتوث الخاصة بهاتفك الذكي قبل إقرانها مرة أخرى.

| السماعات الطبية المتوافقة مع Resound Smart | السماعات الطبية المتوافقة مع تطبيق ReSound Smart 3D |
|---|--|
| ReSound LiNX ² | ReSound Nexia |
| ReSound LiNX | ReSound OMNIA |
| ReSound LiNX TS | ReSound ONE |
| ReSound ENZO ² | ReSound LiNX Quattro |
| ReSound ENZO | ReSound ENZO Q |
| ReSound Up Smart | ReSound Key |
| | ReSound LiNX 3D |
| | ReSound ENZO 3D |

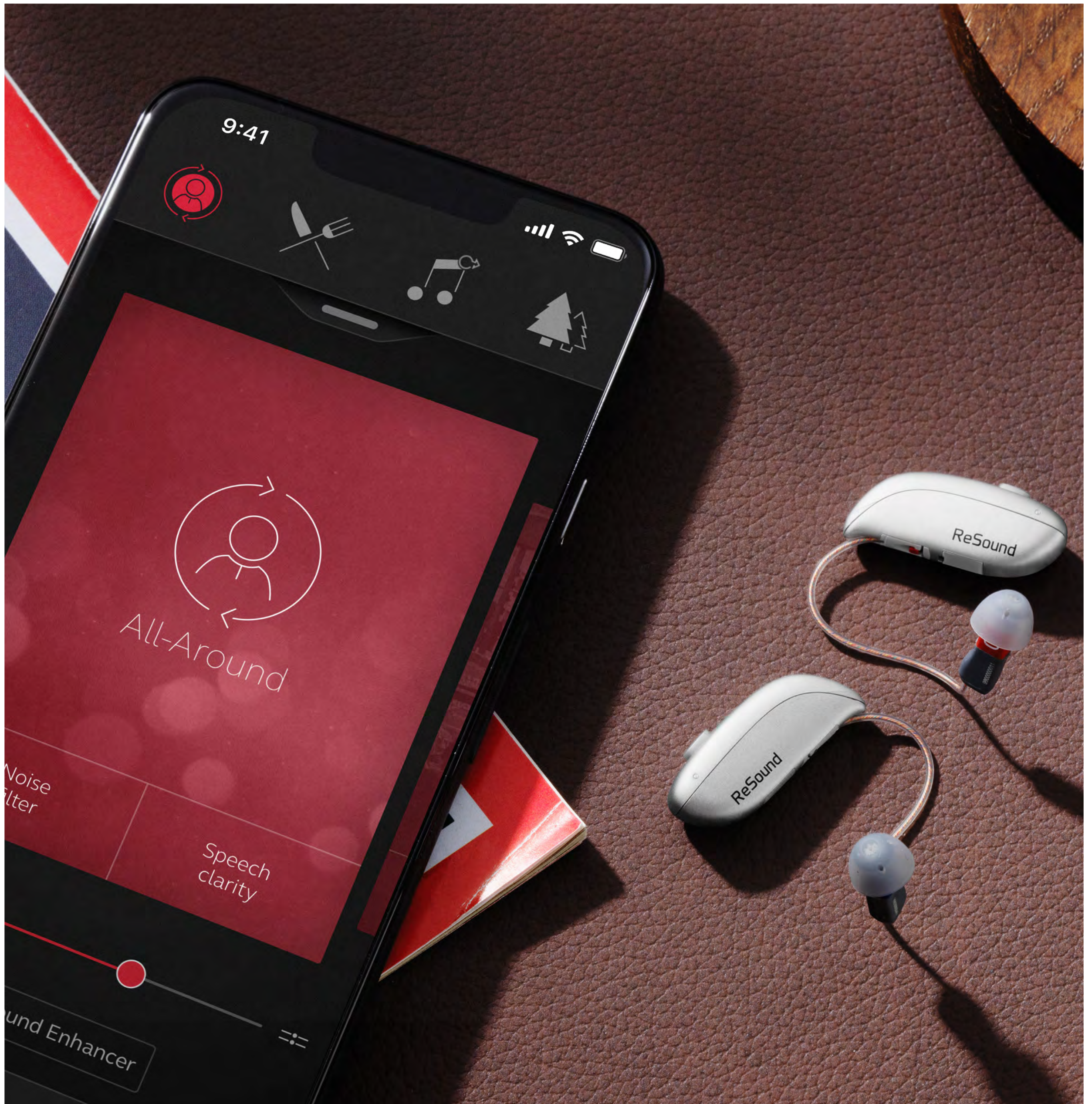

كيفية استخدام التطبيق:

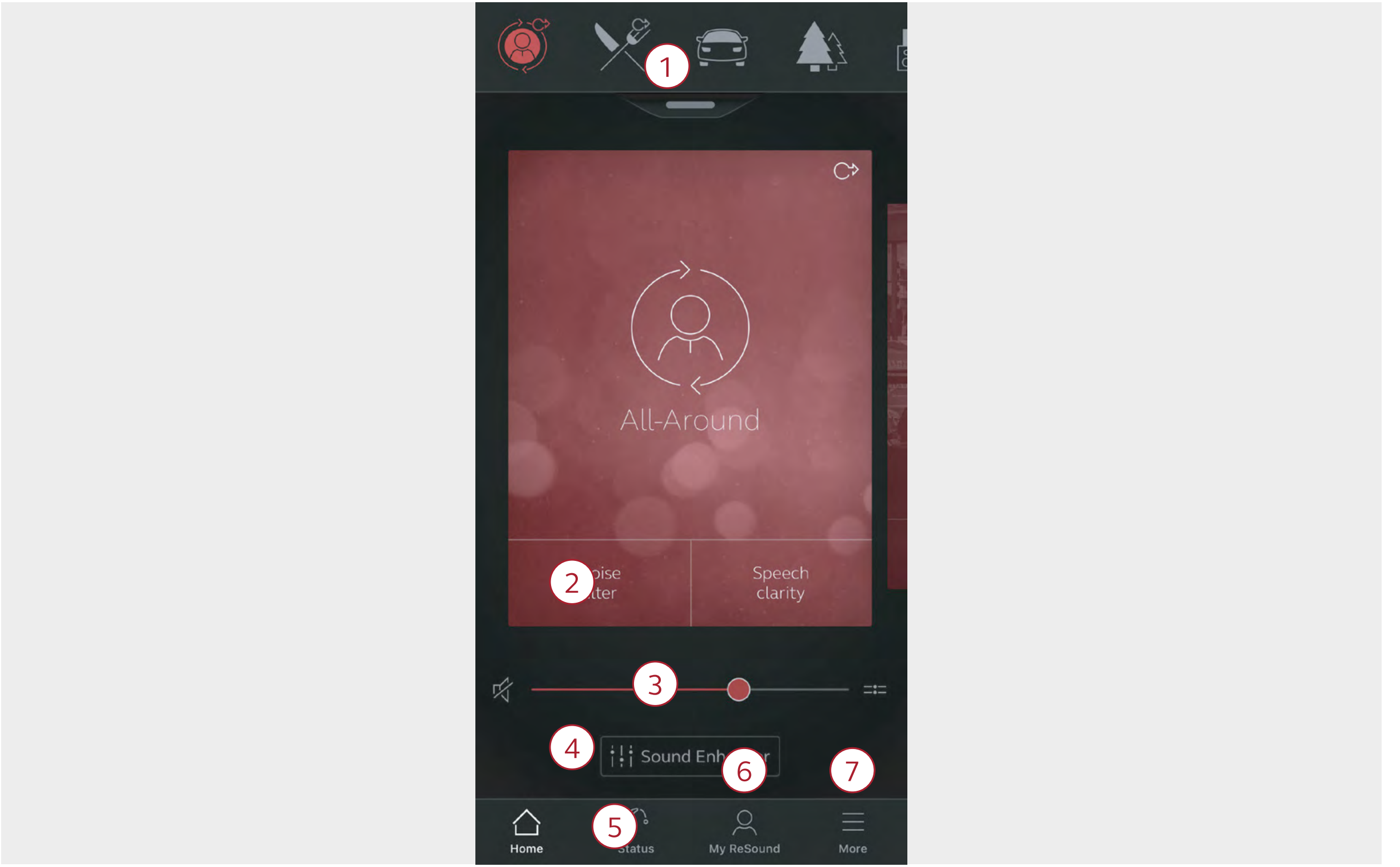

الشاشة الرئيسية:

1. استخدم الشريط العلوي أو القائمة المنسدلة أو بتمرير الشاشة لليمين أو اليسار لاختيار سماعتك الطبية أو برامج البث أو تفضيلاتك كما يمكنك الضغط على القائمة المنسدلة لتعديل البرامج والتفضيلات.
2. استخدم الأزرار السريعة لضبط إعدادات الصوت المتقدمة بنقرة واحدة.
3. قم بضبط مستوى الصوت أو كتمه.
4. يمكنك استخدام «ساوند انهانسر» محسن الصوت لضبط إعدادات حدة / انخفاض / توسط الصوت، أو خفض الضوضاء أو التركيز على الكلام أو تقليل ضجيج الرياح. كما يمكنك استخدام خاصية التحكم بالطنين لضبط درجة ونوع الأصوات الصادرة من خاصية الـ **Tinnitus Sound Generator** * أو إختيار ما يناسبك من أصوات الطبيعة.**
5. قائمة «الحالة»: ستعرض لك شاشة الحالة معلومات حول الاتصال بين جهازك المحمول وسماعتك الطبية وملحقات **ReSound** اللاسلكية. كما سيتم عرض تحذيرات انخفاض البطارية. الوصول لقائمة الحالة للتحقق من حالة السماعة الطبية.
6. قائمة "My"، قائمتي: يمكنك معرفة ما يقدمه لك التطبيق من خدمات مثل ابحث عن سماعتني وتلقي تحديثات لإعدادات سماعتك الطبية.
7. قائمة "More"، المزيد: يمكنك هنا ضبط إعدادات التطبيق والعثور على معلومات إضافية حول تطبيقك.

* يعتمد توفر الميزة على طراز السماعات الطبية، والتركييب الذي قام به اختصاصي السمعيات.


متاحة إذا قام اختصاصي السمعيات بتمكين خاصية **Tinnitus Sound Generator لتخفيف طنين الأذن.

إذا كنت بحاجة إلى إعادة إقران جهاز iOS الخاص بك

١. ابدأ بإزالة الإقران القديم بالانتقال إلى قائمة الإعدادات.
٢. مرر لأسفل وحدد «إمكانية الوصول».
٣. حدد أجهزة السمع.
٤. انقر فوق أجهزة السمع الخاصة بك، ثم مرر لأسفل وانقر فوق «نسيان هذا الجهاز».
٥. أوقف تشغيل جهاز iOS الخاص بك ثم أعد تشغيله.
٦. قم بإعادة خطوات الاقتران للمرة الأولى من جديد.

أبرز مميزات تطبيقات 3D Resound Smart App

- « سواء كنت قد ارتديت سماعة طبية من قبل أو كانت هذه هي المرة الأولى لك، فإن ReSound تجعل السمع أسهل من أي وقت مضى.
- « ستشعر وكأنك لا ترتدي سماعة طبية على الإطلاق.
- « هل تعاني في المواقف الصاخبة؟ لا مشكلة!
- انضم مجدداً إلى المحادثات، والتواصل الاجتماعي واكتشف الأصوات من حولك.

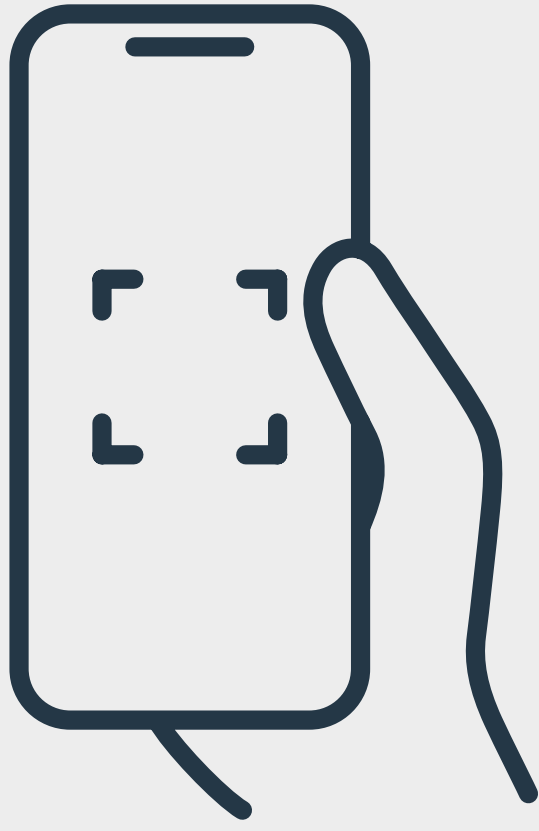

تعرف على كيفية ارتداء سماعتك الطبية بشكل صحيح، وتخصيص تجربة الصوت الخاصة بك باستخدام تطبيق Resound Smart 3D



تصاميم مخصصة للأجهزة الذكية:

مصممة للأيفون والايباد

١. التحكم في تناول يدك تحكم في مستوى الصوت والوضوح عبر تطبيق
Resound Smart 3D

٢. عندما تقوم بتوصيل سماعتك الطبية بالأيفون أو الأيباد.

استمتع بالرد واجراء المكالمات دون استخدام اليدين وحمل الهاتف خلال المكالمة ***
وتشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو أي مقاطع صوتية أخرى في سماعتك
الطبية مباشرة.

الاتصال بأجهزة الأندرويد:

١. يمكنك استخدام أجهزة الأندرويد لتعديل مستوى الصوت والإعدادات الأخرى في
سماعتك الطبية.

٢. كما يمكنك التمتع بخيارات صوتية مختلفة كتشغيل المقاطع الصوتية مباشرة،
والحصول على تجربة تواصل متطورة.

*** ميزة إجراء المكالمات دون استخدام اليدين تعمل مع سماعات،
ReSound OMNIA, ReSoundNexia, و ReSound ONE وتتوافق مع
أيفون 11 أو إصدار أحدث.

قم بمسح رمز الاستجابة
لمعرفة أقرب فرع



الرقم الموحد

920019160

madahearing.com